



AntiNass elektronischer Weckapparat für Kinder, die ihr Bett nassen (Enuretiker). Ein modernes System, das **drahtlos** ist und der aktuellen Technologie entspricht.

Inbetriebnahme des Systems (siehe Fotos)

Vorbereitung des Senders (b) und des Nässefühlers (a)

1. Entfalten Sie eine **Serviette** (c) und platzieren Sie den **Nässefühler** darauf, zentriert, matte Seite gegen die Serviette
2. Falten Sie nun die beiden herausragenden Flügel der **Serviette** über den **Nässefühler**, so dass es über jedem der Druckknöpfe nur eine Schicht Papier hat
3. Nehmen Sie den **Nässefühler** und die **Serviette** in eine Hand, ohne die **Serviette** zu verschieben, und platzieren Sie den Zeigefinger unter einem der Druckknöpfe. Positionieren Sie den **Sender** mit der anderen Hand über dem Druckknopf, um das Papier zu perforieren. Wiederholen Sie dies für den 2. Druckknopf. Die Polarität spielt keine Rolle. Der **Sender** schaltet sich automatisch ein. Nach Gebrauch des Nässefühlers kontrollieren Sie bitte, ob in den Druckknöpfen des Nässefühlers eventuell Papierrückstände der weissen Servietten vorhanden sind. Diese müssen entfernt werden
4. Platzieren Sie den **Nässefühler** im Slip, auf dem Bauch des Kindes, mit der Zunge des Nässefühlers zwischen den Beinen und dem Sender gegen den Slip (nicht gegen die Haut). Achten Sie darauf, dass die **Serviette** sich nicht verschieben kann (wenn nötig mit Klebeband befestigen), um den direkten Kontakt mit der Haut zu vermeiden.

Gehen Sie bitte sorgfältig mit dem **Nässefühler** um. Er darf nicht gefaltet werden. Normalerweise nimmt er die Körperform an.

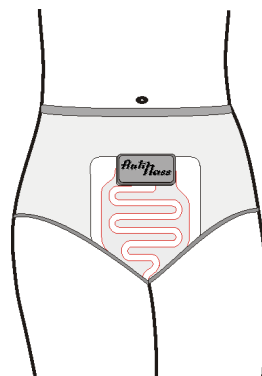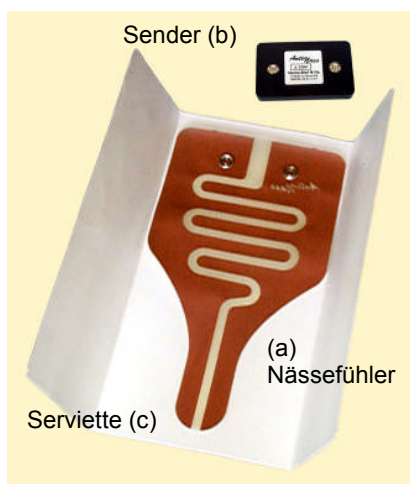


Der Nässefühler ist sehr empfindlich, so dass er so schnell wie möglich reagieren kann. Falls Ihr Kind ziemlich schwitzt, ist es möglich, dass der AntiNass Fehlalarme erzeugt. Dies kann leicht behoben werden, in dem man unter dem Nässefühler einen zusätzlichen Slip trägt (Slip – Nässefühler mit Serviette und Sender – Slip).

Falls dieses Problem weiter vorkommen sollte, rufen Sie uns bitte an.

Vorbereitung des Empfängers (d)

1. Stellen Sie den **Empfänger** in die Nähe des Bettes, aber ausser Reichweite des Kindes, um zu vermeiden, dass es ihn abschaltet, bevor es ganz wach ist
2. Schliessen Sie den **Netztrafo** (e) an einer Steckdose (230V) an
3. Schalten Sie den **Empfänger** ein (Schalter auf < On >). Die grüne LED-Anzeige muss leuchten.

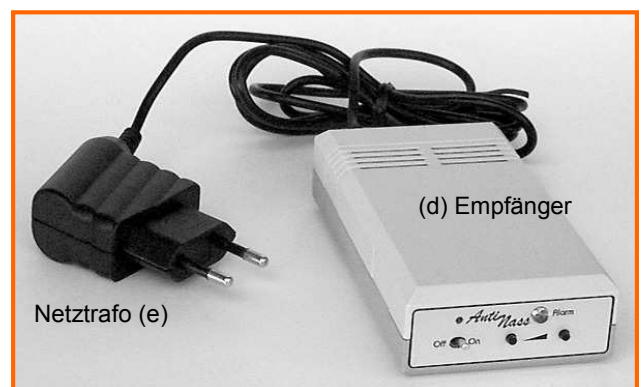

Test des Systems

1. Schalten Sie den **Empfänger** ein (Schalter auf < On >)
2. Verbinden Sie die beiden Druckknöpfe des **Senders** mit einem metallenen Gegenstand (zum Beispiel einem Kaffeelöffel). Der Sender wird automatisch aktiviert und überträgt dem Empfänger das Signal (der Alarm wird ausgelöst und die rote LED-Anzeige blinkt).

Wenn es keinen Alarm gibt:

Kontrollieren Sie, dass der Empfänger und der Sender nicht zu weit von einander entfernt sind (begrenzte Übertragungsdistanz). Beziehen Sie sich auf die Rubrik « Im Fall von Problemen ».

Einstellen der Lautstärke des Empfängers (wenn nötig)

- **Lautstärke reduzieren:** Auf die linke Taste (**leise**) drücken, bis dass die gewünschte Lautstärke erreicht ist
- **Lautstärke erhöhen:** Auf die rechte Taste (**laut**) drücken, bis dass die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Die Lautstärke wird automatisch gespeichert (auch bei Stromausfall)

Drücken Sie bitte nicht beide Tasten gleichzeitig!



Achtung!

Der **Sender** darf nicht mit den Druckknöpfen auf eine metallene Oberfläche gelegt weder auf dem Nässefühler mit der nassen Serviette gelassen werden. Er würde sonst dauernd senden, was die Batterien entladen würde. Er darf nie geöffnet werden. Um die Abdichtung zu gewährleisten, dürfen die Batterien nur durch **Melebi SA** ausgewechselt werden.

Der **Empfänger** und der **Netztrafo** dürfen nie mit Wasser in Kontakt kommen (Stromschlag Gefahr!).

Im Fall von Problemen

Die grüne LED-Anzeige des Empfängers leuchtet nicht:

- Kontrollieren Sie, dass der Netztrafo an einer Dose 230V angeschlossen ist
- Kontrollieren Sie, dass der Schalter auf < On > ist.

Kein akustischer oder optischer Alarm:

- Kontrollieren Sie, dass die grüne LED-Anzeige des Empfängers leuchtet
- Drücken Sie kurz auf eine der beiden Lautstärkeregelstasten:
Der Alarm muss ausgelöst werden
- Überbrücken Sie mit einem Kaffeelöffel die beiden Druckknöpfe des Senders:
Der Alarm muss ausgelöst werden.

Wenn das AntiNass System nach diesen Kontrollen nicht funktioniert, rufen Sie uns bitte sofort an.

Bitte der Rücksendung beilegen:

- Das ausgefüllte Doppel des Diagramms
- Alle gemieteten Teile (a, b, d + e)
- Die **ungeöffneten** Serviettenpakete (c).



Melebi SA

Château 59
2520 La Neuveville

Tel. 032 751 27 95 / FAX 032 751 27 82

E-Mail: info@melebi.ch / www.antinass.ch