

# Mode d'emploi

# Pipi-Stop AntiNass



**Pipi-Stop réveil électronique** pour les enfants qui mouillent leur lit (enfants énurétiques).  
Un système moderne, **sans fil**, répondant à la technologie actuelle.

## Mise en service du système (voir photos)

### Préparation de l'émetteur (b) et du détecteur d'urine (a)

1. Dépliez une **serviette** (c) et placez le **détecteur d'urine** dessus en le centrant, face mate contre la **serviette**
2. Repliez sur le **détecteur** le papier qui dépasse des 2 côtés, de manière à ce qu'il n'y ait qu'une couche de papier sur chacun des boutons-pressions
3. Prenez le **détecteur** et la **serviette** dans une main, sans déplacer la **serviette**, et placez l'index sous l'un des boutons-pressions. Positionnez l'**émetteur** avec l'autre main au-dessus du bouton-pression pour perforer le papier et faites de même pour le 2<sup>ème</sup> bouton-pression. Le sens de la polarité ne joue aucun rôle. L'**émetteur** s'enclenche automatiquement. Après utilisation du détecteur, il est important de contrôler et d'enlever les déchets éventuels des serviettes blanches dans les pressions du détecteur
4. Placez le **détecteur d'urine** dans le slip, sur le ventre de l'enfant, la languette entre les jambes. L'**émetteur** doit être du côté du slip et non de la peau. Veillez à ce que la **serviette** ne puisse pas se déplacer (si nécessaire la fixer avec du scotch) pour éviter un contact direct du **détecteur** avec la peau.


Le **détecteur d'urine** doit être manipulé délicatement. Il ne doit pas être plié en deux. Par contre, il est normal qu'il prenne la forme du corps.

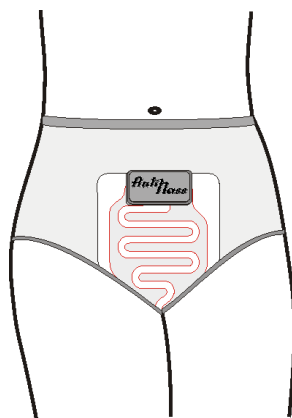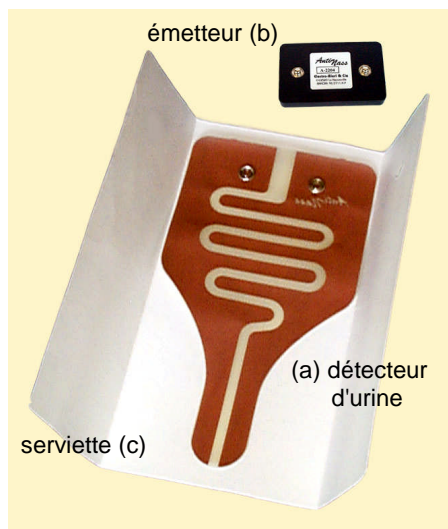

Le détecteur d'urine est très sensible de manière à pouvoir réagir le plus vite possible. Si votre enfant transpire passablement, il est possible que le Pipi-Stop produise des fausses alarmes. Il est facile d'éviter ceci en portant un slip supplémentaire sous le détecteur (slip – détecteur avec serviette et émetteur – slip). Contactez-nous si ce problème devait persister.

### Préparation du récepteur (d)

1. Placez le **récepteur** à proximité du lit, mais hors de portée de l'enfant afin d'éviter qu'il ne l'arrête avant d'être complètement réveillé
2. Branchez le **transformateur** (e) à une prise 230 Volts
3. Enclenchez le **récepteur** (interrupteur sur <On>). La lampe témoin verte doit s'allumer.

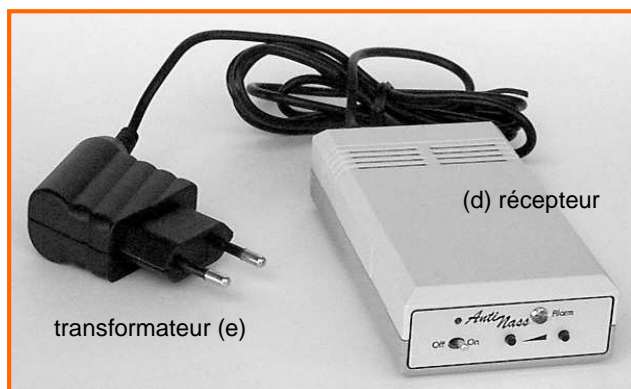

## Test du système

1. Assurez-vous que le **récepteur** est enclenché (interrupteur sur < On >)
2. Reliez les 2 boutons-pressions de l'**émetteur** avec un objet métallique (par exemple une cuillère à café). L'émetteur est automatiquement activé et transmet le signal au récepteur (alarme acoustique + lumière rouge clignotante).

Si vous n'obtenez pas d'alarme:

vérifiez que le **récepteur** et l'**émetteur** se trouvent à proximité (distance de transmission limitée). Référez-vous à la rubrique « En cas de problèmes ».

## Réglage du volume sur le récepteur (si nécessaire)

- Pour **baisser le volume**, pressez le bouton de gauche (**faible**) jusqu'à obtention du volume désiré
- Pour **augmenter le volume**, pressez le bouton de droite (**fort**) jusqu'à obtention du volume désiré.

L'intensité du son est automatiquement mémorisée (même en cas de panne d'électricité).

Ne pressez pas les 2 boutons en même temps!



## **Attention!**

L'émetteur ne doit pas être posé côté boutons-pressions sur une surface métallique ni être laissé sur le détecteur d'urine avec la serviette mouillée, car il émettrait en permanence, ce qui déchargerait les piles. Il ne doit jamais être ouvert. Les piles ne peuvent être changées que par **Melebi SA** pour des raisons d'étanchéité.

Le **récepteur** et le **transformateur** ne doivent **jamais** être mis en contact avec de l'eau (danger d'électrocution!).

## En cas de problèmes

### ***Si la lumière verte du récepteur ne s'allume pas:***

- vérifiez que le transformateur soit branché à une prise 230 Volts
- vérifiez que l'interrupteur soit sur < On >.

### ***S'il n'y a pas d'alarme:***

- vérifiez que la lumière verte du récepteur soit allumée
- pressez brièvement sur un des 2 boutons-poussoirs de réglage du volume: l'alarme doit s'activer
- pontez les 2 boutons-pressions de l'émetteur avec une cuillère à café: l'alarme doit s'activer.

**Si le système Pipi-Stop ne fonctionne pas après avoir effectué ces contrôles, veuillez nous contacter immédiatement.**

## A nous retourner lors du renvoi:

- le double du diagramme rempli
- toutes les parties louées (a, b, d + e)
- les paquets de serviettes (c) non entamés.



**Melebi SA**

**Château 59  
2520 La Neuveville**

tél. 032 751 27 95 / fax 032 751 27 82

e-mail: [info@melebi.ch](mailto:info@melebi.ch) / [www.pipi-stop.ch](http://www.pipi-stop.ch)