



**Pipi-Stop** sveglia elettronica per bambini che bagnano il loro letto (bambini affetti di enuresi). Un sistema moderno, **senza filo** e che corrisponde alla tecnologia attuale.

**Mettere in funzione il sistema** (vedere le foto)

## Preparazione dell'emittente (b) e del rivelatore d'urina (a)

1. Spiegate una **carta assorbente** (tovagliolo - c) e posizionateci sopra il **rivelatore d'urina** mettendo il lato opaco sulla carta assorbente
2. Piegare sul **rivelatore** la **carta assorbente** eccedente sui due lati, in modo che un solo strato di carta rivesta ciascuno dei due bottoni automatici
3. Prendete il **rivelatore** e la **carta assorbente** in una mano e mettete l'indice sotto uno dei bottoni automatici senza spostare la **carta assorbente**. Posizionate il **trasmettitore** con l'altra mano sopra uno dei bottoni automatici affinché possiate perforare la **carta assorbente** e fate la medesima azione per il secondo bottone. Il senso della polarità non ha nessuna influenza perché il **trasmettitore** si attiva automaticamente. Dopo l'uso del rivelatore verificate che nei bottoni automatici del rivelatore dell'urina non si trovino pezzettini di carta assorbente bianchi. Questi vanno rimossi
4. Posizionate il **rivelatore d'urina** nello slip sulla pancia del bambino; la linguetta di contatto va messa in mezzo alle gambe. L'**emittente** deve essere posizionato all'esterno (lato slip) e non sulla pelle. Badate che la **carta assorbente** non si sposti a lato (se necessario fissare con dello scotch), per evitare un contatto diretto del **rivelatore d'urina** con la pelle.

Il **rivelatore d'urina** deve essere usato con la massima cura. Non deve essere piegato in due. E' invece normale che si curvi sulla forma del corpo.

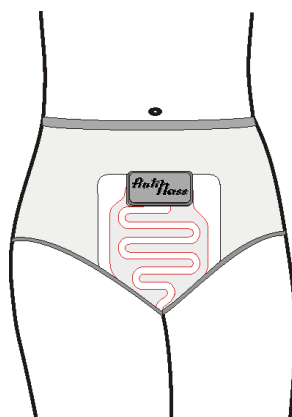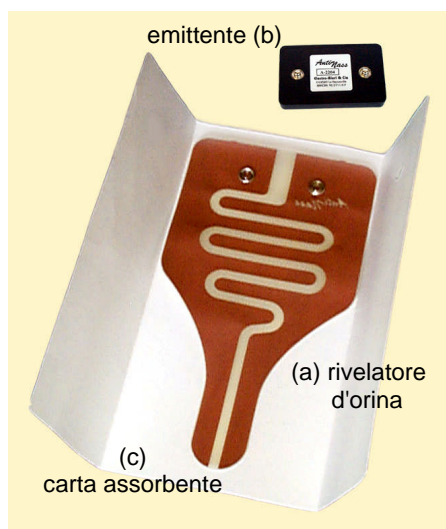


Il rivelatore d'urina è estremamente sensibile, ciò gli permette di reagire il più in fretta possibile.

Se il vostro bambino dovesse sudare in abbondanza, è possibile che Pipi-Stop produca dei falsi allarmi. Per evitare ciò, potete inserire uno slip supplementare sotto il rivelatore d'urina (slip - rivelatore d'urina con il trasmettitore - slip). Se il problema dovesse persistere non esitate a contattarci.

## Preparazione del ricevitore (d)

1. Piazzate il **ricevitore** vicino al letto, ma fuori dalla portata del bambino per evitare che lo spenga prima di essere completamente sveglio
2. Inserite il **trasformatore** (e) ad una presa di 230 Volt
3. Attaccate il **ricevitore** (interruttore su <On>). La spia verde deve accendersi.

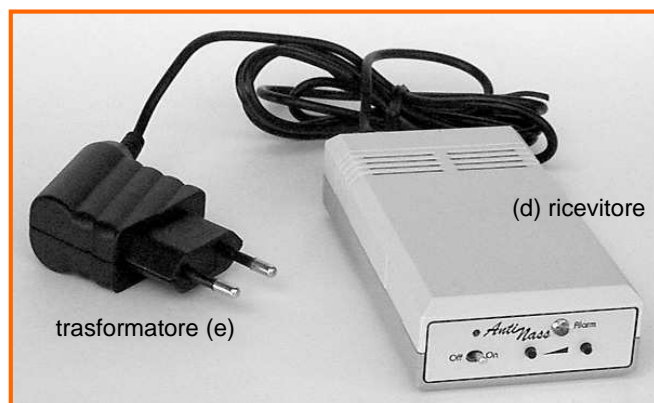

## Prova del sistema

1. Attaccate il **ricevitore** (interruttore su <On>)
2. Collegate i due bottoni automatici dell'**emittente** con un oggetto metallico (per esempio un cucchiaino). L'emittente si attacca automaticamente e trasmette il segnale al ricevitore (l'allarme acustico risuona e la spia rossa lampeggia).

Se l'allarme non dovesse funzionare:

Verificate che il ricevitore e l'emittente siano vicini (distanza di trasmissione limitata). RiferiteVi alla rubrica « In caso di problemi ».

## Regolazione del volume del ricevitore (se necessario)

- Per **abbassare il volume**: Premere il bottone di sinistra (debole) fino a che si ottiene il volume desiderato
- Per **aumentare il volume**: Premere il bottone di destra (forte) fino a che si ottiene il volume desiderato.

L'intensità del suono è automaticamente memorizzata (anche in caso di guasto elettrico).

Non premere i due bottoni nel medesimo tempo!



### **Attenzione!**

L'emittente non deve essere posata con i bottoni automatici su una superficie metallica e non deve essere lasciata sul rilevatore d'urina con la carta assorbente bagnata poiché trasmetterebbe continuamente, con conseguente scaricamento delle batterie. Non deve mai essere aperta. Le batterie possono essere cambiate solamente da **Melebi SA** per garantire l'impermeabilità dell'apparecchio.

Il **ricevitore** e il **trasformatore** non devono mai entrare in contatto con dell'acqua (pericolo d'elettroshock!)

## In caso di problemi

**Se la luce verde del ricevitore non si accende:**

- verificate che il trasformatore (e) sia collegato con una presa 230 Volt
- verificate che l'interruttore sia posizionato su <On>.

**Mancanza d'allarme acustico e ottico:**

- verificate che la spia verde del ricevitore sia accesa
- premete brevemente su uno dei due bottoni automatici di controllo del volume: l'allarme deve accendersi automaticamente
- collegate con un cucchiaino i due bottoni automatici dell'emittente: l'allarme deve accendersi automaticamente.

**Se il sistema Pipi-Stop non dovesse funzionare dopo aver effettuato questi controlli, vogliate contattarci immediatamente.**

Per favore allegare al rinvio:

- il duplicato riempito del diagramma
- tutti gli elementi affittati (a, b, d + e)
- i pacchi tovaglioli non aperti (c)



**Melebi SA**

**Château 59  
2520 La Neuveville**

tel. 032 751 27 95 / fax 032 751 27 82

e-mail: [info@melebi.ch](mailto:info@melebi.ch) / [www.pipi-stop.ch](http://www.pipi-stop.ch)