

# "Pipi a letto"

L'enuresi notturna

**Pipi-Stop** sveglia elettronica

senza filo per bambini affetti da enuresi

Dal 1952



**Fare pipì a letto!** Contrariamente a quanto si possa immaginare, la pipì a letto è un problema estremamente frequente che resta tuttavia **tabù**. Proprio per questo sia il bambino colpito da enuresi notturna che la sua famiglia sono sottoposti ad una notevole pressione. Per quanto riguarda le statistiche, è possibile constatare che quasi il 10% dei bambini di 6 anni ed il 6% dei bambini di 10 anni sono affetti da enuresi; i maschi ne sono inoltre maggiormente colpiti che le femmine. Diversi studi dimostrano che, per quanto riguarda i bambini oltre i 5 anni, si tratta in generale, dal 70 all' 85%, di un problema genetico.

Grazie a queste cifre potete notare **che non siete gli unici colpiti da questo problema**. Ma anche in questa situazione non c'è motivo di drammatizzare, in quanto **il vostro bambino può guarire da questa malattia e riacquisire fiducia in se stesso**.

Generalmente, all'età di 5, 6 anni, i bambini smettono naturalmente di fare pipì a letto ma qualche volta necessitano di più tempo. Ciò dipende dalla maturità del bambino e dal suo sviluppo fisico.

**L'enuresi è diventata un ostacolo per il vostro bambino?** Non può più partecipare ad alcune delle attività di gruppo (dormire da un amico o da un'amica, andare in campeggio con la scuola, ecc.)? Se questo è il caso, **è finalmente giunto il momento di occuparsi seriamente del problema!** Insieme vogliamo intraprendere quanto possibile affinché non faccia più la pipì a letto.

Il nostro metodo è basato sul **condizionamento del riflesso secondo Pavlov** (terapia comportamentale suggestiva della *enuresis nocturna*) e porta il nome di **Pipi-Stop**. Si tratta di un metodo che guarisce **senza medicine** e si presenta sotto forma di una **sveglia elettronica**. La maggior parte dei bambini affetti da enuresi hanno un sonno estremamente profondo e non sono pertanto coscienti della loro minzione involontaria durante il sonno. Pipi-Stop è dotato di un sistema di allarme che sveglierà il bambino al momento giusto (alle prime gocce di urina). In questo modo, **egli potrà prendere coscienza dello stimolo e imparerà a gestire il**

**bisogno acquisendo il riflesso di ritenere l'orina** e svegliarsi per andare al bagno.

### **Pipì-Stop è molto semplice da utilizzare**

Un foglio di poliestere conduttore (rivelatore d'urina) verrà posizionato nello slip, che potrà essere portato da solo o sotto il pigiama. Alle prime gocce d'urina, verrà trasmesso un segnale all'apparecchio ricevitore. A quel momento l'allarme si accenderà emettendo un suono e una luce lampeggiante.



### **Per riuscire la cura**

- Il bambino deve essere motivato e partecipare alla terapia
- Durante l'allarme il bambino deve essere **completamente sveglio** (essere cosciente). Una persona adulta lo deve alzare, gli deve parlare sufficientemente affinché all'indomani si ricordi di quanto accaduto
- Il bambino deve **essere svegliato soltanto una volta a notte** per evitare un inutile stress
- Prima d'iniziare la cura, consultare un medico affinché si possano escludere eventuali cause organiche dell'enuresi.

### **I vantaggi dell'apparecchio Pipì-Stop**

- ✓ È il sistema **più efficace** per la cura dell'enuresi (più di 85% di riuscite)
- ✓ È il sistema che **riscontra il minor numero di ricadute**
- ✓ È **senza sostanze chimiche** e, dunque, **senza effetti collaterali**
- ✓ È **senza filo**: il bambino può muoversi liberamente senza rischiare d'avvolgersi!

- ✓ È **senza pericolo**: le onde dell'emittente sono molto deboli (più di 100'000 volte debole che queste del un telefonino) e sono trasmesse soltanto durante l'allarme
- ✓ **Non richiede al bambino di evitare le bevande**, nemmeno la sera
- ✓ **Cura in tempi brevi**: in media da 10 a 12 settimane
- ✓ **Ha una lunga esperienza**: da quasi **80 anni** curiamo con successo i bambini affetti di enuresi. Centinaia di testimonianze e lettere di riconoscimento confermano continuamente l'efficacia del nostro metodo
- ✓ **Svolgimento della cura**: potete sempre contattarci per sottoporci le vostre domande concernenti la cura
- ✓ **Pipì-Stop è conforme alle prescrizioni Prpm** (prescrizioni prodotti medicinali).


Per beneficiare del **contributo della vostra cassa malati**, il bambino deve avere **5 anni compiuti**. Non dimenticate di chiedere la ricetta al vostro medico curante.

**La nostra sveglia elettronica Pipì-Stop è in affitto.**  
**Per ordinarla o per ulteriori informazioni, vogliate contattarci o visitare il nostro sito Internet: [www.pipi-stop.ch](http://www.pipi-stop.ch)**

 **Melebi SA**  
Château 59  
2520 La Neuveville

**Pipì-Stop**  
**AntiNass**

tel. 032 751 27 95 / fax 032 751 27 82  
e-mail: [info@melebi.ch](mailto:info@melebi.ch) / [www.pipi-stop.ch](http://www.pipi-stop.ch)

 Nostro apparecchio  
riempie le direttive RoHS